

Ihre Bedürfnisse mitgedacht



CrystalClear Plus

Medizinisches Personal – Akutstationen, HNO, OP

Die CrystalClear Plus Trachealkanülen für den Einmalgebrauch von Rüsch wurden entwickelt, um eine kostengünstige Lösung im Vergleich zu Kanülen für den Ein-Patienten-Gebrauch zu bieten, besonders als erste Kanülenoption, da ein Wechsel in der Regel nach weniger als 30 Tagen erforderlich ist.¹

Die Rüsch CrystalClear Plus Thermosensitive PVC Tracheostomiekanüle weist beim Einführen die erforderliche Steifigkeit auf und wird durch die Körpertemperatur weicher, um sich an anatomische Unterschiede anzupassen.¹

Die Innenkanülen für CrystalClear Plus Trachealkanülen sind steril, latexfrei und bestehen aus einem DEHP-freien, flexiblen Polyestergeflecht (PET) mit einem nicht abnehmbaren, integrierten, nach Größe farbcodierten Stopper aus Silikon. Das flexible Design erhält die Leistung der thermosensitiven Kanüle.


Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufsstandes im Designprozess der CrystalClear Plus Produkte berücksichtigt?

- Eine flexible Halteplatte und ein weiches Halteband reduzieren während der Verwendung die Bewegung der Kanüle an Granulationsgewebe, wodurch das Risiko im Zusammenhang mit Blutungen, Infektionen und Patientenbeschwerden minimiert wird.²
- Die dünnwandigen Trachealkanülen mit und ohne Cuff sind in den Größen 3,5 mm bis 10,0 mm, einschließlich Zwischengrößen, erhältlich, um den Patientenkomfort und die Atemarbeit zu unterstützen.
- Kits der Größe 6 und darüber enthalten 2 farbcodierte Innenkanülen.
- Der integrierte 15-mm-Drehkonnektor reduziert das Drehmoment während einer Bewegung des Beatmungssystems während der Versorgung.

Rüsch CrystalClear Plus Trachealkanüle

15-mm-Drehkonnektor
Reduziert die Drehkraft am
Beatmungssystem

Cuff
Kanülen sind mit oder
ohne Cuff erhältlich

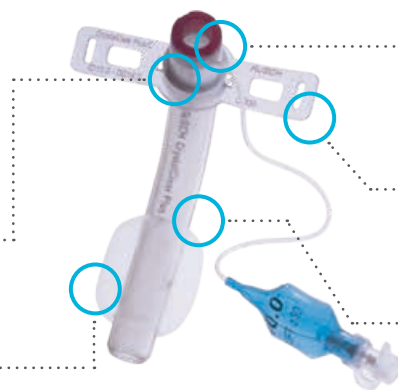

Innenkanüle

Die Farbe des Anschlussstücks der
Innenkanüle stimmt mit der Schriftfarbe
auf der Halteplatte überein

Dünne, flexible Halteplatte

Erleichtert eine effektive Stomaversorgung¹

95° Schaft

Unterstützt einen sicheren Sitz, um ein
versehentliches Herausgleiten zu verhindern²

CrystalClear Plus Trachealkanüle von Rüsch

ARTIKEL NR.*	ARTIKEL NR.**	GRÖSSE / ID (MM)	AD (MM)	LÄNGE (MM)	WINKEL Ø CA.	CUFF Ø (MM)	INNEN- KANÜLE	TUBUS	FARB-CODIERUNG	VE
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Rot	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Weiß	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Grau	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Blau	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Grün	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Orange	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Kastanienbraun	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Blau	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Gelb	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Lila	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Grün	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Braun	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Marineblau	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Rot	5

*Ohne Cuff. **Mit Cuff.

Das Set enthält: Trachealkanüle (mit oder ohne Cuff), weiches Halteband, 2 farbcodierte Innenkanülen, Patientenausweis, Beutel mit Gleitgel auf Wasserbasis

Rüsch CrystalClear Zubehör

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VE
121311	Duschkappe für Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Hustenkappe für Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Verschlusskappe für Rüsch CrystalClear Plus	4

Rüsch Crystal Clear PercuTwist PDT Set

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	VE
121556	7,0 / 8,0 / 9,0	1

Das Set enthält: Kanüle mit Einführhilfe, Punktionskanüle, Spritze, Führungsdraht, Innenkanüle, Halteband

Rüsch CrystalClear Innenkanüle

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	ID (MM)	AD (MM)	FARB-CODIERUNG	VE
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Orange	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Kastanienbraun	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Blau	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Gelb	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lila	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Grün	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Braun	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Marineblau	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rot	10

www.teleflextracheostomy.com



Quellenangaben

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren. Der Inhalt der ungeöffneten, unbeschädigten Verpackung ist sauber, gebrauchsfertig und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Aktuelle Warnhinweise, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Teleflex, das Teleflex-Logo, CrystalClear und Rüsch sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Überarbeitet 02/2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2023-0074 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com