

Ihre Bedürfnisse mitgedacht

TracheoFix

Krankenpflegekräfte und Unterstützungsnetzwerk für Atemwegsmanagement in der Akutversorgung

TracheoFix Trachealkanülen von Rüsch für den Ein-Patienten-Gebrauch wurden entwickelt, um den Übergang von der Versorgung im Krankenhaus zur häuslichen Versorgung zu erleichtern. Die gebogene Kanülenform, das weiche und sichere Halteband sowie die flexiblen Flügel des Haltesystems unterstützen die täglichen Krankenhausprotokolle zur Versorgung der Patienten, ohne deren Komfort zu beeinträchtigen. Das diskrete Anschlusssystem sorgt für eine sichere Befestigung einer Reihe von speziellem Zubehör für spontan atmende Patienten und umfasst eine Hustenkappe, um den Auswurf nach unten in ein Gewebe abzuleiten, eine Verschlusskappe, die den Kanülenansatz für die Mund-/Nasenatmung verschließt, und eine Duschkappe, um das Risiko zu verringern, dass Wassertropfen in die Kanüle eindringen. Das Sprechventil verfügt über einen O₂-Adapter, der einen Sauerstoffbolus während der Einatmung ermöglicht. Es gibt auch eine Auswahl an Innenkanülen, entweder mit oder ohne vormontiertem 15-mm-Konnektor zur Verwendung mit allen TracheoFix Tracheostomiekanülen.

Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufsstandes im Designprozess der TracheoFix Produkte berücksichtigt?

- Eine flexible Halteplatte und ein weiches Halteband reduzieren während der Verwendung die Bewegung der Kanüle an Granulationsgewebe, wodurch das Risiko im Zusammenhang mit Blutungen, Infektionen und Patientenbeschwerden minimiert wird.²
- Jede Innenkanüle verfügt über einen farbigen Ring, der angibt, mit welcher Kanülengröße diese verwendet werden soll. Die entsprechende Kanüle weist die auf der Halteplatte aufgedruckten Informationen in derselben Farbe auf.
- Dies verringert das Risiko, dass versehentlich eine kleinere Innenkanüle verwendet wird, welche die Atemarbeit erschwert.
- Der Inhalt des Sets hängt vom ausgewählten Tubus ab. Das gesamte Zubehör sowie die Innenkanülen sind einzeln erhältlich.



TracheoFix Trachealkanüle

Innenkanüle



Farbcodierung

Größenspezifische farbcodierte Schrift zur einfacheren Erkennung der Innenkanülengröße

Fenestrierte Sets

Fenestrierte und nicht fenestrierte Kanülenoptionen

Cuff

Kanülen sind mit oder ohne Niederdruck-Cuff erhältlich



Dünne, flexible Halteplatte

Erleichtert eine effektive Stomaversorgung und ermöglicht die Befestigung sowohl durch Annäht als auch mit dem Halteband

Zubehör



Rüsch TracheoFix Trachealkanüle

BESTELLNUMMER 5 EINHEITEN	ART.- NR.	GRÖSSE / ID (MM)	AD (MM)	LÄNGE (MM)	WINKEL Ø CA.	CUFF Ø (MM)	INHALT DES SETS
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Komforthalteband, 2x 15-mm-Innenkanüle, Einführhilfe (Obturator).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen und 1 ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, Einführhilfe, 1x 15-mm-Innenkanüle, 1x flache Innenkanüle, Haltering, Hustenkappe.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Rüsch TracheoFix Innenkanüle

BESTELLNUMMER 5 EINHEITEN	ID (MM)	AD (MM)	BESCHREIBUNG
121425-000070	5,5	6,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000085	7,0	8,2	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000100	8,5	9,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000110	9,5	10,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121430-000070	5,5	6,7	Flach (kurz)
121430-000085	7,0	8,2	Flach (kurz)
121430-000100	8,5	9,7	Flach (kurz)
121430-000110	9,5	10,7	Flach (kurz)
121435-000070	5,5	6,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000085	7,0	8,2	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000100	8,5	9,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000110	9,5	10,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121440-000070	5,5	6,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000085	7,0	8,2	Flach mit Fenestrierungen
121440-000100	8,5	9,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000110	9,5	10,7	Flach mit Fenestrierungen

Rüsch TracheoFix Zubehör

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VE
121445	Verschlusskappe	4
121455	Sprechventil mit O ₂ -Adapter	2
121460	Hustenkappe	4
121465	Haltering für die flache Innenkanüle	4



www.teleflextracheostomy.com

Quellenangaben

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren. Der Inhalt der ungeöffneten, unbeschädigten Verpackung ist sauber, gebrauchsfertig und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Aktuelle Warnhinweise, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracheoFix Plus sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Überarbeitet (01/2023). Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

© 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2023-0072 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com