

Ihre Bedürfnisse mitgedacht

TracheoFix

Patienten und Unterstützungsnetzwerke für die häusliche Pflege

Die TracheoFix Trachealkanüle von Rüsch ermöglicht Ihnen die Reinigung der Kanüle und der Innenkanüle¹ zur Unterstützung einer effektiven Tracheostomahygiene. Dank der flexiblen Flügel des Haltesystems haben Sie guten Zugang zum Tracheostoma für die Routineversorgung, wenn die Kanüle mit dem in jedem Set enthaltenen weichen Halteband befestigt wird. Die Haltebänder sind auch einzeln erhältlich, da sie entsorgt werden sollten, wenn sie verschmutzt sind. Ein flaches, diskretes Anschlussystem sorgt für eine sichere Befestigung einer Reihe von speziellem Zubehör für spontan atmende Patienten und kann eine Hustenkappe beinhalten, um den Auswurf nach unten in ein Gewebe abzuleiten, eine Verschlusskappe, die den Kanülenansatz für die Mund-/Nasenatmung verschließt, und eine Duschkappe, um das Risiko zu verringern, dass Wassertropfen in den Tubus eindringen. Das Sprechventil verfügt über einen O₂-Adapter, der einen Sauerstoffbolus während der Einatmung ermöglicht. Es gibt auch eine Auswahl an Innenkanülen, entweder mit oder ohne vormontiertem 15-mm-Konnektor zur Verwendung mit allen TracheoFix Tracheostomiekanülen.

Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufsstandes im Designprozess der TracheoFix Produkte berücksichtigt?

- Die gebogene Kanülenform unterstützt einen schonenden Kanülenwechsel während der Reinigung und dem Wechsel²
- Die dünnwandige Kanüle unterstützt eine effektive Atemarbeit, da der Innendurchmesser des Tubus optimiert wurde, während der Außendurchmesser des Tubus für mehr Komfort auf ein Mindestmaß verkleinert wurde.
- Der Inhalt des Sets hängt von der ausgewählten Kanüle ab. Das gesamte Zubehör sowie die Innenkanülen sind einzeln erhältlich.
- Mit oder ohne Cuff sowie jeweils fenestriert oder nicht fenestriert erhältlich.
- Fenestrierungen mit mehreren Öffnungen ermöglichen einen Luftstrom zu den Stimmbändern (falls vorhanden) und unterstützen dadurch das Sprechen und die Atemarbeit, wenn kein Beatmungsgerät erforderlich ist.³

TracheoFix Trachealkanüle

Innenkanüle



Farbcodierung

Größenspezifische farbcodierte Schrift zur einfacheren Erkennung der Innenkanülengröße

Fenestrierte Sets

Fenestrierte und nicht fenestrierte Tubusoptionen

Cuff

Kanülen sind mit oder ohne Niederdruck-Cuff erhältlich



Dünne, flexible Halteplatte

Erleichtert eine effektive Stomaversorgung und ermöglicht die Befestigung sowohl durch Annahrt als auch mit dem Halteband

Zubehör



Rüsch TracheoFix Trachealkanüle

BESTELLNUMMER 5 EINHEITEN	BESTELLNUMMER 1 EINHEIT	ART.- NR.	GRÖSSE / ID (MM)	AD (MM)	LÄNGE (MM)	WINKEL Ø CA.	CUFF Ø (MM)	INHALT DES SETS
121400-000070	859000-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Komforthalteband, 2x 15-mm-Innenkanüle, Einführhilfe (Obturator).
121400-000085	859000-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	859000-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	859000-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	859001-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen und 1 ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121410-000085	859001-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	859001-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	859001-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	859002-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Komforthalteband, Einführhilfe, 1x 15-mm-Innenkanüle, 1x flache Innenkanüle, Haltering, Hustenkappe.
121415-000085	859002-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	859002-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	859002-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	859003-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121420-000085	859003-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	859003-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	859003-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Rüsch TracheoFix Innenkanüle

BESTELLNUMMER 5 EINHEITEN	BESTELLNUMMER 1 EINHEIT	ID (MM)	AD (MM)	BESCHREIBUNG
121425-000070	859004-000070	5,5	6,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000085	859004-000085	7,0	8,2	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000100	859004-000100	8,5	9,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000110	859004-000110	9,5	10,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121430-000070	859005-000070	5,5	6,7	Flach (kurz)
121430-000085	859005-000085	7,0	8,2	Flach (kurz)
121430-000100	859005-000100	8,5	9,7	Flach (kurz)
121430-000110	859005-000110	9,5	10,7	Flach (kurz)
121435-000070	859006-000070	5,5	6,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000085	859006-000085	7,0	8,2	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000100	859006-000100	8,5	9,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000110	859006-000110	9,5	10,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121440-000070	859007-000070	5,5	6,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000085	859007-000085	7,0	8,2	Flach mit Fenestrierungen
121440-000100	859007-000100	8,5	9,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000110	859007-000110	9,5	10,7	Flach mit Fenestrierungen

Rüsch TracheoFix Zubehör

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VE
121445	Verschlusskappe	4
121455	Sprechventil mit O ₂ -Adapter	2
121460	Hustenkappe	4
121465	Haltering für die flache Innenkanüle	4

Quellenangaben

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren. Der Inhalt der ungeöffneten, unbeschädigten Verpackung ist sauber, gebrauchsfertig und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Aktuelle Warnhinweise, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracheoFix Plus sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Überarbeitet (01/2023). Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

© 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2023-0073 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com



www.teleflextracheostomy.com