

Conçue

*pour répondre
à vos besoins*



CrystalClear Plus

Personnel infirmier et intervenants dans la prise en charge des voies respiratoires en soins intensifs

Les canules de trachéotomie Rüsch CrystalClear Plus en PVC thermosensible sont conçues pour le confort du patient et assurer des soins efficaces de la stomie. De plus, des fonctions de sécurité supplémentaires pour le patient ont été ajoutées, à savoir un code couleur permettant de sélectionner aisément la taille de la canule et la taille de la chemise interne correspondante.

Le personnel infirmier est celui qui a le plus d'interactions avec les patients trachéotomisés et leurs proches. Notre priorité est de leur apporter notre soutien pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, tant lors de l'utilisation des dispositifs que lors des soins et des traitements quotidiens.

Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif CrystalClear Plus ?


- Tous les composants du kit sont à usage unique pour réduire les risques d'infection croisée chez les patients et les soignants, ce qui élimine la nécessité d'un nettoyage.
- Une collerette flexible et une lanière de fixation souple réduisent le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection, ainsi que la douleur.
- Les canules de trachéotomie fines avec et sans ballonnet sont disponibles dans des tailles de 3,5 à 10,0 mm, avec des tailles intermédiaires, pour favoriser le confort du patient et faciliter l'effort respiratoire.
- Chaque kit à partir de la taille 6 inclut deux chemises internes flexibles.

Rüsch CrystalClear Plus

Canule de trachéotomie

Raccord rotatif de 15 mm
Conçu pour réduire la torsion avec les circuits de ventilation

Ballonnet
Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet

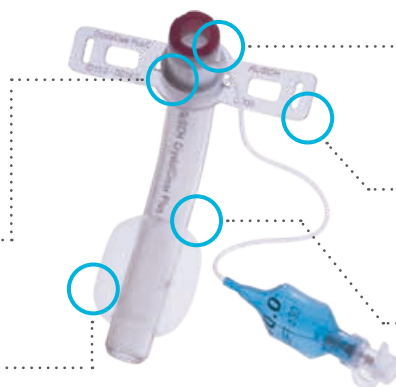

Chemise interne
Code couleur pour faciliter l'identification de la taille

Collerette flexible et fine
Facilite les soins efficaces de la stomie

Gaine à 95 °
Favorise une fixation sûre pour éliminer tout risque de décanulation accidentelle²

Canule de trachéotomie Rüsch CrystalClear Plus

RÉFÉRENCE*	RÉFÉRENCE**	TAILLE / D.I. (MM)	D.E. (MM)	LONGUEUR (MM)	Ø ANGLE APPROX.	Ø BALLONNET (MM)	CHEMISE INTERNE	CANULE	CODE COULEUR	QTÉ
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95 °	11,0	–	3,5	Rouge	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95 °	12,0	–	4,0	Blanc	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95 °	14,0	–	4,5	Gris	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95 °	14,0	–	5,0	Bleu	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95 °	15,0	–	5,5	Vert	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95 °	19,0	6,0	–	Orange	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95 °	19,0	6,5	–	Bordeaux	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95 °	21,0	7,0	–	Bleu	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95 °	25,0	7,5	–	Jaune	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95 °	28,0	8,0	–	Violet	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95 °	28,0	8,5	–	Vert	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	–	Marron	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	–	Bleu marine	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95 °	30,0	10,0	–	Rouge	5

*Sans ballonnet

**Avec ballonnet

Contenu du kit : Canule de trachéotomie avec ou sans ballonnet, lanière de fixation souple, 2 chemises internes avec code couleur, carte patient, sachet de gel lubrifiant à base d'eau

Accessoires Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
121311	Capuchon protège-douche pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Capuchon antiprojections pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Capuchon d'étanchéité pour Rüsch CrystalClear Plus	4

Chemise interne Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE	TAILLE	D.I. (MM)	D.E. (MM)	CODE COULEUR	QTÉ
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Orange	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Bordeaux	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Bleu	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Jaune	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Violet	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Vert	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marron	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Bleu marine	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rouge	10

Références

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, CrystalClear et Rüsch sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Mise à jour 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-101150 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com

Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com

Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com