


Conçue

*pour répondre
à vos besoins*

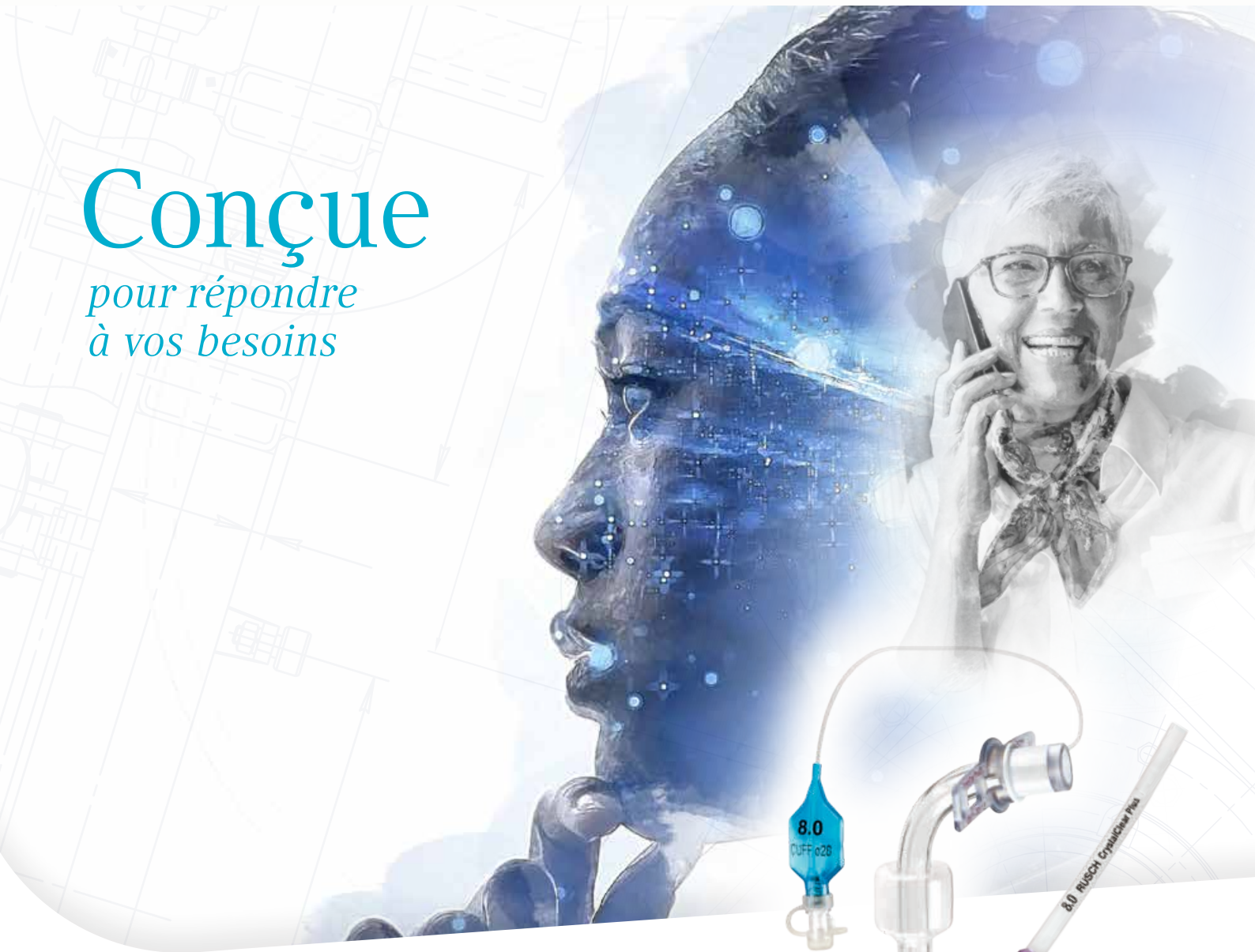

CrystalClear Plus

**Patients et aidants pour les soins
à domicile**

Les canules de trachéotomie Rüsç CrystalClear Plus sont conçues pour améliorer le confort du patient. La canule en PVC thermosensible a une rigidité suffisante pour l'insertion, puis s'assouplit à la température corporelle pour épouser l'anatomie du patient.

Une chemise interne flexible Rüsç CrystalClear Plus peut être retirée ou remplacée aisément pour réduire le risque de décanulation accidentelle. La performance de la canule n'est pas compromise et le confort est assuré.

Aucun nettoyage n'est nécessaire car le contenu du kit est jeté après son utilisation.

La chemise interne de rechange, la lanière de fixation et les accessoires sont disponibles séparément.

Comment vos besoins ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif CrystalClear Plus ?

- Les accessoires CrystalClear Plus ne sont utilisés que lorsque le patient n'est pas sous assistance respiratoire (connecté à un ventilateur).
- Les accessoires comprennent un capuchon antiprojections qui redirige les sécrétions vers un tissu, un capuchon d'étanchéité qui obture le raccord de la canule pour permettre la respiration orale/nasale et un capuchon protège-douche pour réduire le risque d'infiltration de gouttes d'eau dans la canule.
- Une collerette flexible et une lanière de fixation souple réduisent le mouvement de la canule pendant l'utilisation pour un confort accru.
- Les canules de trachéotomie fines avec et sans ballonnet sont disponibles dans des tailles de 3,5 à 10,0 mm (y compris des demi-tailles intermédiaires) pour garantir un ajustement optimal et faciliter l'effort respiratoire.
- Les kits à partir de la taille 6 incluent deux chemises internes flexibles.




Rüsch CrystalClear Plus

Canule de trachéotomie

Raccord rotatif de 15 mm
Conçu pour réduire la torsion avec les circuits de ventilation

Ballonnet
Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet

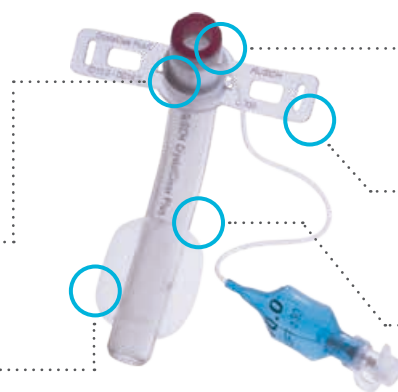

Chemise interne
Couleur de l'embase de la chemise interne identique à la couleur des inscriptions sur la collerette de fixation

Collerette flexible et fine
Facilite les soins efficaces de la stomie¹

Gaine à 95 °
Favorise une fixation sûre pour éliminer tout risque de décanulation accidentelle²

Canule de trachéotomie Rüsch CrystalClear Plus

RÉFÉRENCE* LOTS DE 5 UNITÉS	RÉFÉRENCE* LOTS DE 1 UNITÉ	RÉFÉRENCE** LOTS DE 5 UNITÉS	RÉFÉRENCE** LOTS DE 1 UNITÉ	TAILLE / D.I. (MM)	D.E. (MM)	LON- GUEUR (MM)	Ø ANGLE APPROX.	Ø BAL- LONNET (MM)	CHEMISE INTERNE	CANULE	CODE COULEUR	QTÉ
121300-000035	858600-000035	121303-000035	858603-000035	3,5	5,3	47,0	95 °	11,0	—	3,5	Rouge	5
121300-000040	858600-000040	121303-000040	858603-000040	4,0	5,9	54,0	95 °	12,0	—	4,0	Blanc	5
121300-000045	858600-000045	121303-000045	858603-000045	4,5	6,5	54,0	95 °	14,0	—	4,5	Gris	5
121300-000050	858600-000050	121303-000050	858603-000050	5,0	7,0	57,0	95 °	14,0	—	5,0	Bleu	5
121300-000055	858600-000055	121303-000055	858603-000055	5,5	7,5	58,0	95 °	15,0	—	5,5	Vert	5
121300-000060	858600-000060	121303-000060	858603-000060	6,0	8,7	64,0	95 °	19,0	6,0	—	Orange	5
121300-000065	858600-000065	121303-000065	858603-000065	6,5	8,7	64,0	95 °	19,0	6,5	—	Bordeaux	5
121300-000070	858600-000070	121303-000070	858603-000070	7,0	10,0	70,0	95 °	21,0	7,0	—	Bleu	5
121300-000075	858600-000075	121303-000075	858603-000075	7,5	10,7	75,5	95 °	25,0	7,5	—	Jaune	5
121300-000080	858600-000080	121303-000080	858603-000080	8,0	11,3	81,0	95 °	28,0	8,0	—	Violet	5
121300-000085	858600-000085	121303-000085	858603-000085	8,5	11,3	81,0	95 °	28,0	8,5	—	Vert	5
121300-000090	858600-000090	121303-000090	858603-000090	9,0	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	—	Marron	5
121300-000095	858600-000095	121303-000095	858603-000095	9,5	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	—	Bleu marine	5
121300-000100	858600-000100	121303-000100	858603-000100	10,0	14,0	95,5	95 °	30,0	10,0	—	Rouge	5

*Sans ballonnet

**Avec ballonnet

Contenu du kit : Canule de trachéotomie avec ou sans ballonnet, lanière de fixation souple, 2 chemises internes avec code couleur, carte patient, sachet de gel lubrifiant à base d'eau

Accessoires Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE		DESCRIPTION	QTÉ
121311		Capuchon protège-douche pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121312		Capuchon antiprojections pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121313		Capuchon d'étanchéité pour Rüsch CrystalClear Plus	4
507900		Lanière de fixation confortable	10
507800		Lanière de fixation confortable, taille pédiatrique	10

Chemise interne Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE	TAILLE	D.I. (MM)	D.E. (MM)	CODE COULEUR	QTÉ
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Orange	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Bordeaux	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Bleu	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Jaune	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Violet	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Vert	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marron	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Bleu marine	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rouge	10



www.teleflextracheostomy.com

Références

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Ce document est à destination du public. Les canules de trachéotomie, accessoires et chemises internes Rüsch CrystalClear Plus sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant des DM : Teleflex Medical Athlone, Irlande.

Demandez conseil à un professionnel de santé. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, CrystalClear et Rüsch sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce présent document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Mise à jour 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-2023-0075 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com