

Conçue
pour répondre
à vos besoins



TracFlex Plus


Personnel infirmier et intervenants dans la prise en charge des voies respiratoires en soins intensifs

Chez Teleflex, nous avons continuellement innové et amélioré nos dispositifs depuis 35 ans. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle gamme de canules de trachéotomie pour adultes TracFlex Plus, avec et sans ballonnet.

Le personnel infirmier est celui qui a le plus d'interactions avec les patients trachéotomisés et leurs proches. Notre priorité est de leur apporter notre soutien pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, tant lors de l'utilisation des dispositifs que lors des soins et des traitements quotidiens.

Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracFlex Plus ?

- Une tubulure hautement flexible/antiplicature et une collerette de fixation souple ont été développées pour favoriser le confort du patient et son acceptation de la trachéotomie.
- La collerette flexible réduit le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection, ainsi que la douleur.
- La collerette réglable est facile à manipuler lorsqu'elle est détachée, ce qui réduit la torsion de la canule lors de l'accès au trachéostome.
- Un clic audible confirme le verrouillage sécurisé de la collerette réglable, ce qui réduit le risque de décanulation accidentelle.

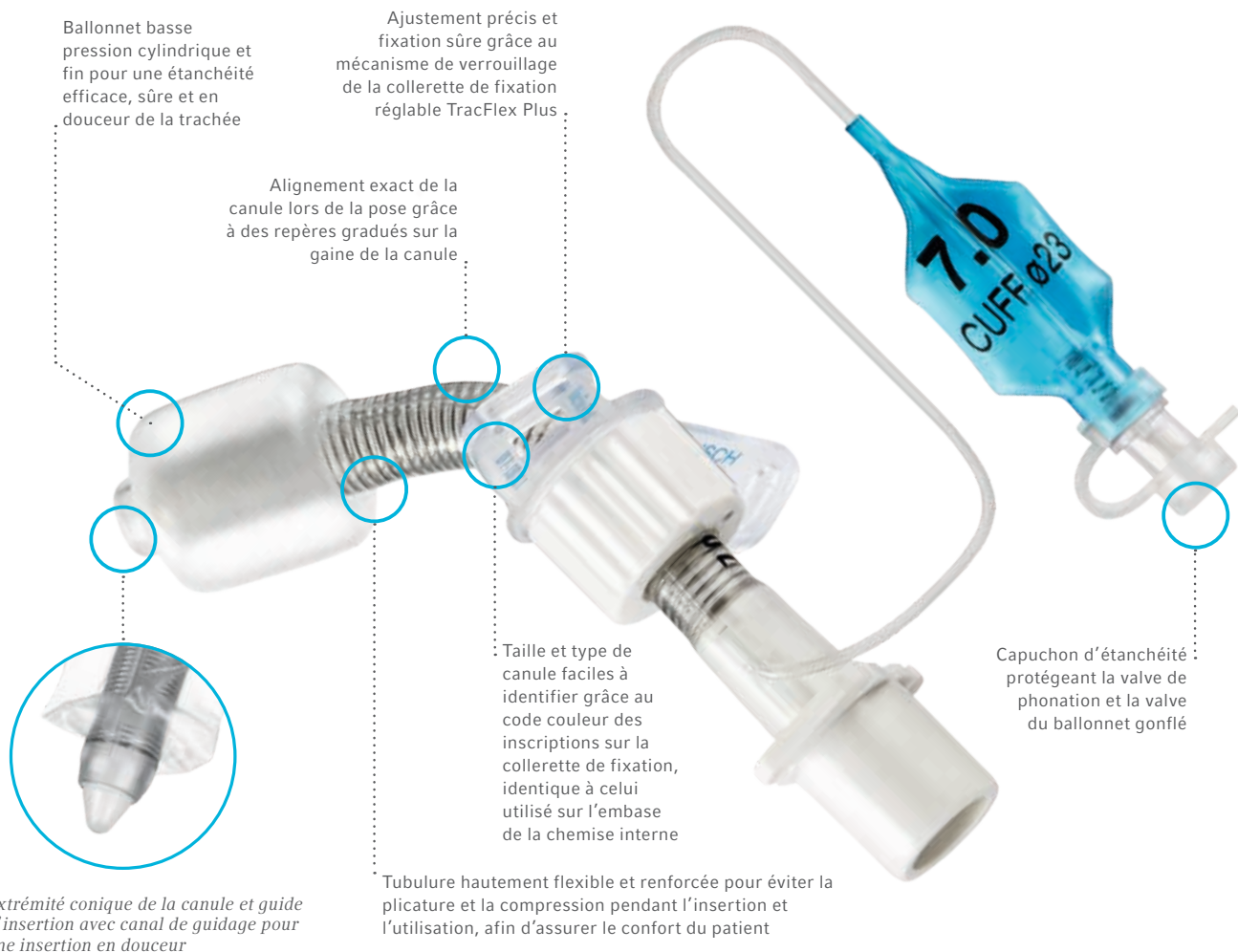

Kit TracFlex Plus (avec ballonnet, réf. 121903 ; sans ballonnet, réf. 121900)

TAILLE DE COMMANDE / D.I.	D.E. EN MM	PLAGE DE LONGUEURS EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ANGLE θ (ENV.)	Ø DU BALL. EN MM **
● 7,0	10,1	60,3 - 66,5	37,5	6,2	22,8	100 °	23
● 8,0	11,1	66,9 - 88,5	41,5	21,6	25,4	100 °	27
● 9,0	12,1	70,4 - 117,3	44,5	46,4	26,4	100 °	30
● 10,0	13,1	78,5 - 121,3	44,5	42,8	34,0	100 °	32
● 11,0	14,2	80,6 - 125,3	47,5	44,7	33,1	100 °	34

** Uniquement versions avec ballonnet

Chemises internes TracFlex Plus (réf. 121910)

TAILLE DE COMMANDE	D.I. EN MM	D.E. EN MM	QTÉ
● 7,0	5,5	6,2	10
● 8,0	6,5	7,2	10
● 9,0	7,8	8,3	10
● 10,0	8,8	9,4	10
● 11,0	9,8	10,4	10

Notre système de chemise interne souple : Gestion efficace et simplifiée des sécrétions

La chemise interne TracFlex Plus est conçue pour éviter l'accumulation de sécrétions dans la lumière interne de la canule de trachéotomie. Elle est à usage unique pour favoriser une bonne hygiène, réduisant ainsi le risque d'infection chez les patients et les soignants.

La chemise interne TracFlex Plus, fine et flexible, s'adapte parfaitement au diamètre interne de la canule de trachéotomie. La torsion de la canule est ainsi minimisée pendant l'insertion et le retrait de la chemise interne.

Accessoires TracFlex Plus

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
121911	Capuchon protège-douche pour canules TracFlex Plus, pour éviter l'infiltration ou l'inhalation de gouttes d'eau dans le bain ou la douche	4
121912	Capuchon antiprojections pour les canules TracFlex Plus, afin de rediriger les sécrétions expulsées	4
121913	Capuchon d'étanchéité pour canules TracFlex Plus, pour le sevrage	4

Ce document est à destination des professionnels de santé. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médicaux de classe : IIb. Organisme notifié : BSI - CE 2797. Fabricant des DM : Teleflex Medical Athlone Ireland. Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch.

Teleflex, le logo Teleflex, Rüsch et TracFlex Plus sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Mise à jour 12 22. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. © 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-101091 - RÉV. 0 - 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
 Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com