

Pensato

per le vostre esigenze

TracheoFix

Personale infermieristico e rete di supporto per la gestione delle vie aeree in terapia acuta

Le cannule tracheostomiche monopaziente RÜsch TracheoFix sono state progettate per facilitare il passaggio dalla struttura ospedaliera all'assistenza domiciliare. Il design curvato della cannula, la fascia di fissaggio morbida e le alette di fissaggio flessibili supportano i protocolli ospedalieri per la cura quotidiana del paziente, garantendone il comfort. Il sistema di attacco discreto si fissa in modo sicuro agli accessori per i pazienti con respirazione spontanea e include un dispositivo antitosse per dirigere l'espettorato in un fazzoletto, un cappuccio di tenuta che occlude il connettore per lo svezzamento della respirazione orale/nasale e un dispositivo di protezione per doccia per ridurre il rischio di ingresso di gocce d'acqua nella cannula. La valvola fonatoria è dotata di un adattatore per O₂ opzionale per erogare un bolo di ossigeno durante l'inspirazione. È inoltre possibile scegliere tra diversi modelli di controcanula, con o senza raccordo da 15 mm preassemblato, da utilizzare con tutte le cannule tracheostomiche TracheoFix.

Di quali esigenze professionali abbiamo tenuto conto nel progettare TracheoFix?

- La flangia flessibile e la morbida fascia di fissaggio riducono il movimento della cannula contro il tessuto di granulazione durante l'uso, contribuendo a minimizzare i rischi di sanguinamento, infezione e disagio del paziente.²
- Ogni controcanula ha un anello colorato che indica la misura della cannula con cui deve essere utilizzata; la cannula corrispondente utilizza lo stesso colore per le indicazioni riportate sulla flangia di fissaggio.
- In questo modo si riduce il rischio di utilizzare accidentalmente una controcanula più piccola, aumentando lo sforzo respiratorio.
- Il contenuto del kit dipende dalla cannula selezionata e tutti gli accessori/controcanule si possono ordinare separatamente.

TracheoFix

Cannula tracheostomica


Controcannula



Codici colore
Scritta di colore specifico
per facilitare
l'identificazione delle
misure della controcanula

Kit fenestrati
Opzioni con cannula fenestrata
e non fenestrata

Cuffia
Le cannule sono disponibili con o
senza cuffia a bassa pressione

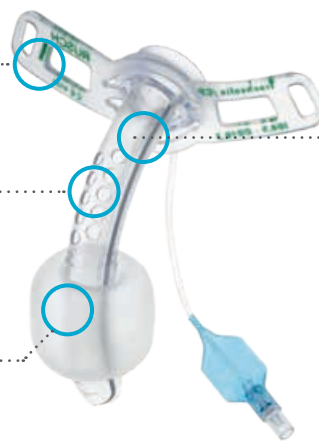

Flangia sottile, flessibile
Consente una cura efficace dello
stoma e offre la possibilità di
utilizzare sia le suture che la
fascia di fissaggio

Accessori



Cannula tracheostomica Rüsch TracheoFix

NUMERO D'ORDINE 5 UNITÀ	RIF	MISURA/ D.I. (MM)	D.E. (MM)	LUNGHEZZA (MM)	ANGOLO Ø (CIRCA)	CUFFIA Ø (MM)	CONTENUTO DEL KIT:
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cannula cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 2 controcanule da 15 mm, introduttore (otturatore).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cannula cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 1 controcanula da 15 mm fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, 1 controcanula a basso profilo fenestrata e 1 non fenestrata, anello di fissaggio, dispositivo antitosse, valvola fonatoria con adattatore O ₂
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cannula non cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, introduttore, 1 controcanula da 15 mm, 1 controcanula a basso profilo, anello di fissaggio, dispositivo antitosse.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cannula non cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 1 controcanula da 15 mm fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, 1 controcanula a basso profilo fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, anello di fissaggio, dispositivo antitosse, valvola fonatoria con adattatore O ₂
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Controcannula Rüsch TracheoFix

NUMERO D'ORDINE 5 UNITÀ	D.I. (MM)	D.E. (MM)	DESCRIZIONE
121425-000070	5,5	6,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000085	7,0	8,2	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000100	8,5	9,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000110	9,5	10,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121430-000070	5,5	6,7	Basso profilo (corto)
121430-000085	7,0	8,2	Basso profilo (corto)
121430-000100	8,5	9,7	Basso profilo (corto)
121430-000110	9,5	10,7	Basso profilo (corto)
121435-000070	5,5	6,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000085	7,0	8,2	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000100	8,5	9,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000110	9,5	10,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121440-000070	5,5	6,7	Basso profilo fenestrata
121440-000085	7,0	8,2	Basso profilo fenestrata
121440-000100	8,5	9,7	Basso profilo fenestrata
121440-000110	9,5	10,7	Basso profilo fenestrata

Accessori Rüsch TracheoFix

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QTÀ
121445	Cappuccio di tenuta	4
121455	Valvola fonatoria con adattatore per O ₂	2
121460	Dispositivo antitosse	4
121465	Anello di fissaggio da utilizzare con controcanula a basso profilo	4



www.teleflextracheostomy.com

Bibliografia

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di riferimento Teleflex o visitare il microsito di Rüsch dedicato alla tracheostomia per scoprire questa linea e gli altri interessanti prodotti Rüsch. Il contenuto della confezione integra e sigillata è pulito, pronto all'uso e monouso. Fare riferimento al foglio illustrativo per le avvertenze aggiornate, le indicazioni, le controindicazioni, le precauzioni e le istruzioni per l'uso.

Teleflex, il logo Teleflex, Rüsch e TracheoFix Plus sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate negli USA e/o in altri paesi. Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante locale. Tutti i dati sono stati aggiornati al momento della stampa. Revisione (01/2023). Pubblicazione soggetta a modifiche tecniche senza preavviso.

© 2023 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. MCI-2023-0072 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuito da:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Regno Unito Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudafrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com