

Pensato

per le vostre esigenze

TracheoFix

Pazienti e reti di supporto nell'assistenza domiciliare

La cannula tracheostomica Rüsch TracheoFix consente la pulizia di cannula e controcanala¹ per favorire un'igiene tracheale efficace, mentre le alette di fissaggio flessibili agevolano l'accesso allo stoma tracheale per le cure di routine, quando la cannula è trattenuta in sede dalla fascia di fissaggio morbida fornita in ogni kit. Le fasce di fissaggio si possono anche acquistare separatamente, in quanto devono essere eliminate quando sono sporche. Il sistema di attacco discreto e a basso profilo si fissa in modo sicuro agli accessori per i pazienti con respirazione spontanea e può includere un dispositivo antitosse per dirigere l'espettorato in un fazzoletto, un cappuccio di tenuta che occlude il connettore per lo svezzamento della respirazione orale/nasale e un dispositivo di protezione per doccia per ridurre il rischio di ingresso di gocce d'acqua nella cannula. La valvola fonatoria è dotata di un adattatore per O₂ opzionale per erogare un bolo di ossigeno durante l'inspirazione. È inoltre possibile scegliere tra diversi modelli di controcanala, con o senza raccordo da 15 mm preassemblato, da utilizzare con tutte le cannule tracheostomiche TracheoFix.

Di quali esigenze professionali abbiamo tenuto conto nel progettare TracheoFix?

- Il design curvato consente di manovrare agevolmente la cannula durante la pulizia o la sostituzione².
- La cannula a pareti sottili favorisce un efficace sforzo respiratorio grazie all'ottimizzazione del diametro interno, mentre il diametro esterno è ridotto al minimo per un maggiore comfort.
- Il contenuto del kit dipende dalla cannula selezionata e tutti gli accessori/controcanule si possono ordinare separatamente.
- Disponibile con o senza cuffia, in versione fenestrata o non fenestrata.
- Le fenestrature multiforo possono agevolare il passaggio dell'aria verso le corde vocali (se presenti) per agevolare il linguaggio e lo sforzo respiratorio nei pazienti non ventilati³.

TracheoFix

Cannula tracheostomica


Controcannula



Codici colore
Scritta di colore specifico per facilitare l'identificazione delle misure della controcanula

Kit fenestrati
Opzioni con cannula fenestrata e non fenestrata

Cuffia
Le cannule sono disponibili con o senza cuffia a bassa pressione

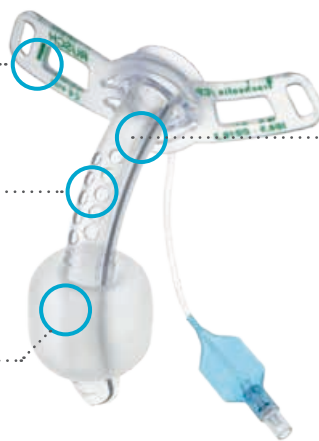

Flangia sottile, flessibile
Consente una cura efficace dello stoma e offre la possibilità di utilizzare sia le suture che la fascia di fissaggio

Accessori



Cannula tracheostomica Rüsch TracheoFix

NUMERO D'ORDINE 5 UNITÀ	NUMERO D'ORDINE 1 UNITÀ	RIF	MISURA/ D.I. (MM)	D.E. (MM)	LUNGHEZZA (MM)	ANGOLO Ø (CIRCA)	CUFFIA Ø (MM)	CONTENUTO DEL KIT:
121400-000070	859000-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cannula cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 2 controcanule da 15 mm, introduttore (otturatore).
121400-000085	859000-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	859000-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	859000-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	859001-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cannula cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 1 controcanula da 15 mm fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, 1 controcanula a basso profilo fenestrata e 1 non fenestrata, anello di fissaggio, dispositivo antitosse, valvola fonatoria con adattatore O ₂
121410-000085	859001-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	859001-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	859001-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	859002-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cannula non cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, introduttore, 1 controcanula da 15 mm, 1 controcanula a basso profilo, anello di fissaggio, dispositivo antitosse.
121415-000085	859002-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	859002-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	859002-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	859003-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cannula non cuffiata, introduttore, fascia di fissaggio comfort, 1 controcanula da 15 mm fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, 1 controcanula a basso profilo fenestrata, 1 controcanula non fenestrata, anello di fissaggio, dispositivo antitosse, valvola fonatoria con adattatore O ₂
121420-000085	859003-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	859003-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	859003-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Controcannula Rüsch TracheoFix

NUMERO D'ORDINE 5 UNITÀ	NUMERO D'ORDINE 1 UNITÀ	D.I. (MM)	D.E. (MM)	DESCRIZIONE
121425-000070	859004-000070	5,5	6,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000085	859004-000085	7,0	8,2	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000100	859004-000100	8,5	9,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121425-000110	859004-000110	9,5	10,7	Raccordo da 15 mm preassemblato
121430-000070	859005-000070	5,5	6,7	Basso profilo (corto)
121430-000085	859005-000085	7,0	8,2	Basso profilo (corto)
121430-000100	859005-000100	8,5	9,7	Basso profilo (corto)
121430-000110	859005-000110	9,5	10,7	Basso profilo (corto)
121435-000070	859006-000070	5,5	6,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000085	859006-000085	7,0	8,2	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000100	859006-000100	8,5	9,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121435-000110	859006-000110	9,5	10,7	Fenestrata con raccordo da 15 mm preassemblato
121440-000070	859007-000070	5,5	6,7	Basso profilo fenestrata
121440-000085	859007-000085	7,0	8,2	Basso profilo fenestrata
121440-000100	859007-000100	8,5	9,7	Basso profilo fenestrata
121440-000110	859007-000110	9,5	10,7	Basso profilo fenestrata

Accessori Rüsch TracheoFix

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QTÀ
121445	Cappuccio di tenuta	4
121455	Valvola fonatoria con adattatore per O ₂	2
121460	Dispositivo antitosse	4
121465	Anello di fissaggio da utilizzare con controcanula a basso profilo	4



www.teleflextracheostomy.com

Bibliografia

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di riferimento Teleflex o visitare il microsito di Rüsch dedicato alla tracheostomia per scoprire questa linea e gli altri interessanti prodotti Rüsch. Il contenuto della confezione integra e sigillata è pulito, pronto all'uso e monouso. Fare riferimento al foglio illustrativo per le avvertenze aggiornate, le indicazioni, le controindicazioni, le precauzioni e le istruzioni per l'uso.

Teleflex, il logo Teleflex, Rüsch e TracheoFix Plus sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate negli USA e/o in altri paesi. Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante locale. Tutti i dati sono stati aggiornati al momento della stampa. Revisione (01/2023). Pubblicazione soggetta a modifiche tecniche senza preavviso.

© 2023 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. MCI-2023-0073 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuito da:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Regno Unito Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudafrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com