

Zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach



TracFlex Plus


Klinicyści – oddziały intensywnej terapii, oddziały otorynolaryngologiczne, blok operacyjny

Firma Teleflex od ponad 35 lat nie ustaje w tworzeniu innowacji i doskonaleniu swoich produktów, a teraz oferuje nową, udoskonaloną gamę zestawów rurek tracheostomijnych z mankietem i bez mankietów dla pacjentów dorosłych.

Wskazania do stosowania rurki tracheostomijnej są zróżnicowane, a pacjenci wymagają częstych zmian – tworzymy nasze produkty tak, by uzyskać lepsze wyniki u pacjentów. Wierzymy, że komfort pacjenta i stopień akceptacji rurki nie tylko ułatwia rekonwalescencję, ale także wspiera zespół kliniczny w codziennej opiece nad pacjentami, wspierając krewnych i zmniejszając ryzyko zakażenia, dzięki czemu ta skomplikowana sytuacja jest łatwiejsza dla wszystkich.

W jaki sposób potrzeby tej grupy zawodowej zostały uwzględnione w procesie projektowania produktu TracFlex Plus?

- Rurkę można łatwo kontrolować podczas wprowadzania – ma ona gładką, stożkową końcówkę i kanał na prowadnicę w obturatorze.
- Giętka/niezałamująca się rurka zwiększa komfort pacjenta oraz akceptację rurki zarówno u pacjentów z prawidłową budową anatomiczną, jak i u tych z budową nietypową¹.
- Giętka kołnierzy szyjny zmniejsza ruch rurki względem ziarninującej tkanki podczas użycia, co może pomóc zmniejszyć ryzyko krwawienia, zakażenia i bólu².
- Regulowany kołnierzy swobodnie się porusza po odblokowaniu, zapewniając łatwe pozycjonowanie, a słyszalne kliknięcie potwierdza stabilne zamocowanie.

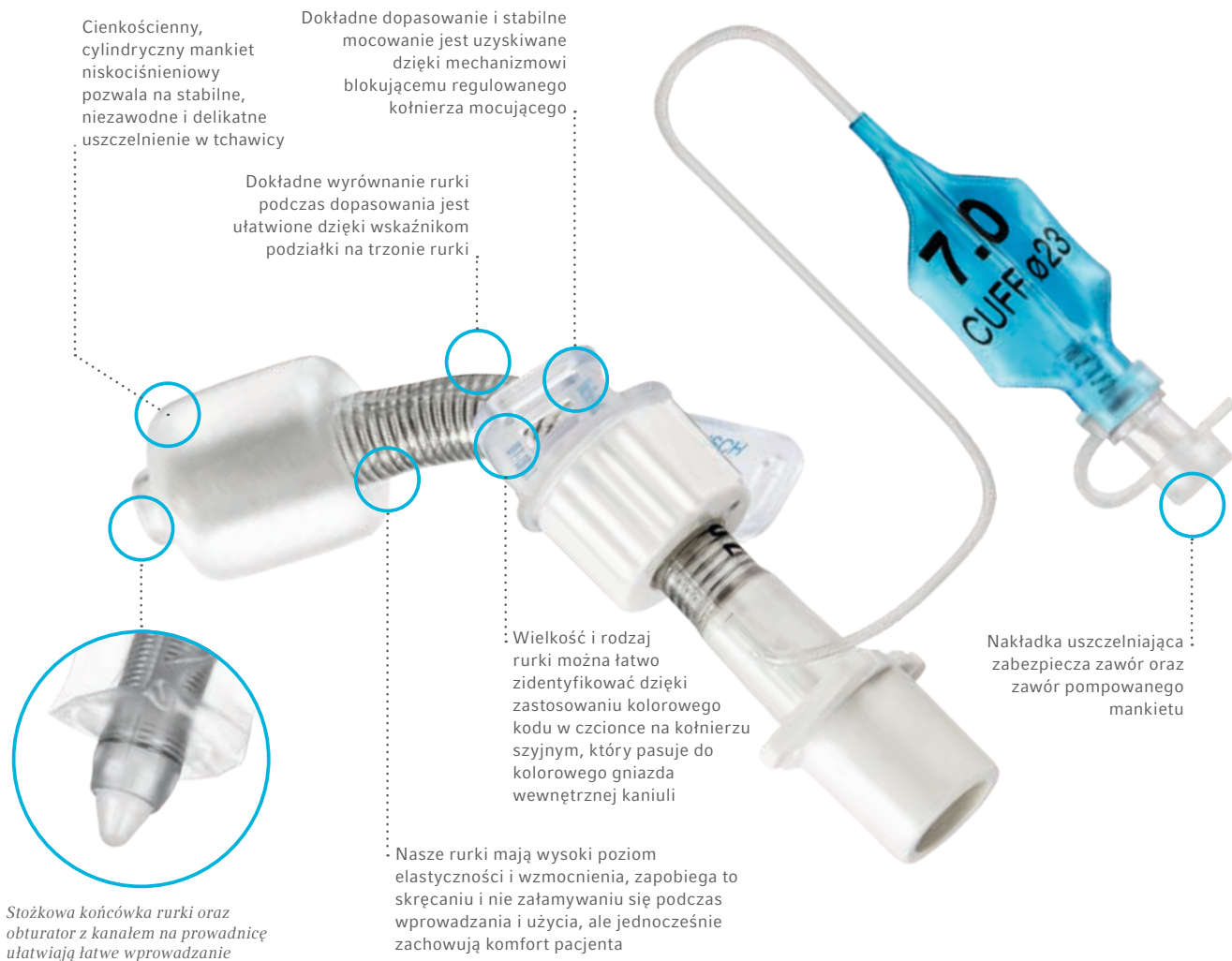

Zestaw TracFlex Plus (z mankiem, nr kat. 121903; bez mankieta, nr kat. 121900)

ROZMIAR ZAMÓWIENIA / ŚR. WEWN.	ŚR. ZEWN. W MM	ZAKRES DŁUGOŚCI (CL) W MM	WYM. A W MM	WYM. B W MM	WYM. C W MM	KĄT Ø (OK.)	Ø MAN-KIETU W MM**
7,0	10,1	60,3–66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9–88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4–117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5–121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6–125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Tylko wersje z mankiem.

Nasz system elastycznej kaniuli wewnętrznej: Skuteczne usuwanie wydzielin stało się prostsze

Kaniula wewnętrzna TracFlex Plus jest zaprojektowana tak, aby chronić wewnętrzny kanał rurki tracheostomijnej przed nagromadzeniem się wydzieliny. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, aby ułatwić utrzymanie odpowiedniej higieny, co redukuje ryzyko zakażenia u pacjentów i opiekunów.

Cienkościenna, giętka kaniula wewnętrzna rurki TracFlex Plus pozwala na ścisłe dopasowanie do wewnętrznej średnicy rurki tracheostomijnej z minimalnym skróceniem rurki podczas wprowadzania i wyjmowania kaniuli wewnętrznej.

Akcesoria TracFlex Plus

REF.	OPIS	SZT.
121911	Zatyczka prysznicowa do rurek TracFlex Plus zabezpiecza przed pryskającą wodą, zapobiegając przedostawaniu się lub wdychaniu kropli wody podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem	4
121912	Zatyczka kaszlowa do rurek TracFlex Plus pomaga w odprowadzaniu wydzieliny w kierunku do dołu	4
121913	Zatyczka uszczelniająca do rurek TracFlex Plus (podczas odłączania)	4

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rusch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rüsch.

Teleflex, logo Teleflex, Rüsch oraz TracFlex Plus są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA lub w innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Aktualizacja 12 22. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. © 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-101148 · WER. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com