

Zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach



TracFlex Plus

Pacjenci i sieć wsparcia w ramach opieki domowej


Firma Teleflex od ponad 35 lat nie ustaje w doskonaleniu swoich produktów, a teraz oferuje nową, udoskonaloną gamę zestawów rurek tracheostomijnych z mankietem i bez mankietów dla pacjentów dorosłych.

Podczas projektowania rurek tracheostomijnych tak, by spełniały potrzeby pacjentów w opiece domowej, najważniejsze są następujące cechy:

- Komfort: rurka, mankiet (jeśli jest wymagany), kołnierz szyjny i opaska szyjna
- Powinny zapewniać optymalne oddychanie z minimalnym stosunkiem śr. zewn. / śr. wewn.
- Należy zapewnić specjalne akcesoria, aby zwiększać bezpieczeństwo i poprawiać codzienne życie
- Rurkę można wyczyścić, jeśli to konieczne, aby poprawić rutynowe czynności higieniczne
- Wewnętrzna kaniula, pozwalająca utrzymać czystość głównej rurki, powinna również być giętka, aby uniknąć negatywnego wpływu na efektywność rurki.

W jaki sposób Wasze potrzeby zostały uwzględnione w procesie projektowania produktu TracFlex Plus?

- Wysoce elastyczna / niezłamująca się rurka, miękka opaska szyjna i giętka kołnierz do mocowania zwiększają komfort podczas oddychania z pomocą wentylatora / spontanicznego jedzenia, picia i naturalnych ruchów głowy.
- Regulowany kołnierz porusza się swobodnie, gdy jest odblokowany, co pozwala na bezpieczną zmianę pozycji podczas pielęgnacji stomii i po niej.
- Odgłos kliknięcia potwierdza, że mechanizm regulowanego kołnierza jest stabilnie zamocowany, aby redukować ryzyko przypadkowej dekanilacji.
- Skrzydełka kołnierza na szyi są przezroczyste, aby ukazywać naturalny odcień skóry.
- Dostępne są: giętka kaniula wewnętrzna, nakładki pod prysznic, do kaszlenia i uszczelniająca.

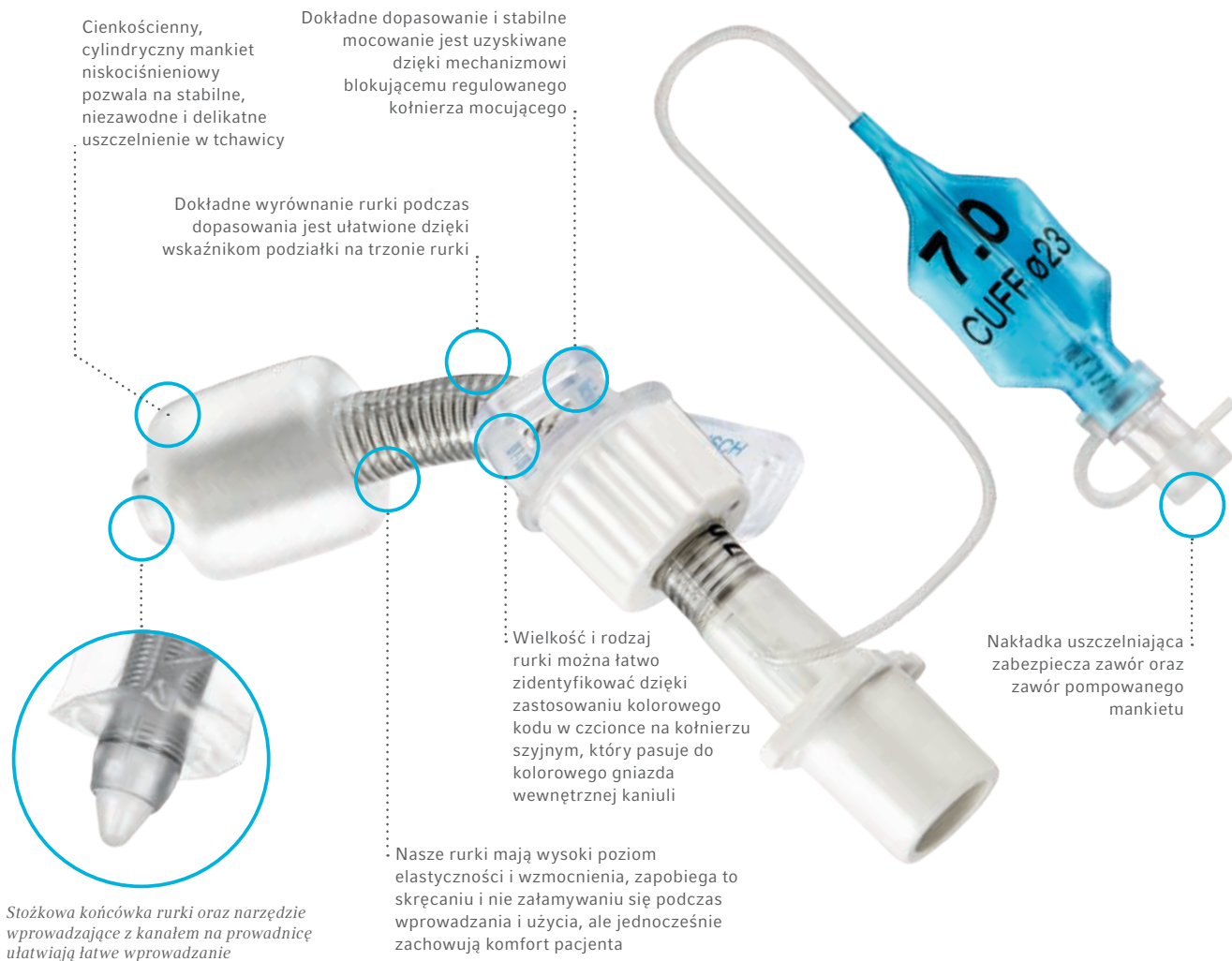

Zestaw TracFlex Plus (z mankiem, nr kat. 121903; bez mankieta, nr kat. 121900)

ROZMIAR ZAMÓWIENIA / ŚR. WEWN.	ŚR. ZEWN. W MM	DŁUGOŚCI (CL) W MM	WYM. A W MM	WYM. B W MM	WYM. C W MM	KĄT Ø (OK.)	Ø MAN-KIETU W MM**
7,0	10,1	60,3–66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9–88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4–117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5–121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6–125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Tylko wersje z mankiem.

Kaniule wewnętrzne TracFlex Plus (ref. 121910)

ROZMIAR ZAMÓWIENIA	ŚR. WEWN. W MM	ŚR. ZEWN. W MM	SZT.
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Nasz system elastycznej kaniuli wewnętrznej: Skuteczne usuwanie wydzielin stało się prostsze

Kaniula wewnętrzna TracFlex Plus jest zaprojektowana tak, aby chronić wewnętrzny kanał rurki tracheostomijnej przed nagromadzeniem się wydzieliny. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, aby ułatwić utrzymanie odpowiedniej higieny, co redukuje ryzyko zakażenia u pacjentów i opiekunów.

Cienkościenna, giętka kaniula wewnętrzna rurki TracFlex Plus pozwala na ścisłe dopasowanie do wewnętrznej średnicy rurki tracheostomijnej z minimalnym skręcaniem rurki podczas wprowadzania i wyjmowania kaniuli wewnętrznej.

Akcesoria TracFlex Plus

REF.	OPIS	SZT.
121911	Zatyczka prysznicowa do rurek TracFlex Plus zabezpiecza przed przyskającą wodą, zapobiegając przedostawaniu się lub wdychaniu kropli wody podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem	4
121912	Zatyczka kaszlowa do rurek TracFlex Plus pomaga w odprowadzaniu wydzieliny w kierunku do dołu	4
121913	Zatyczka uszczelniająca do rurek TracFlex Plus (podczas odłączania)	4

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rüşch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rüşch.

Teleflex, logo Teleflex, Rüşch oraz TracFlex Plus są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA lub w innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Aktualizacja 12 22. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. © 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-101149 · WER. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com